



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Слуховой аппарат Ахон К-80



#### Работа с устройством



1. Откройте батарейный отсек и вставьте батарею, соблюдая полярность. Плотно закройте батарейный отсек.  
Примечание: наушник перестает работать, когда отсек открыт, начинает работать, когда батарейный отсек закрыт.
2. Наденьте вкладыш на наушник.
3. Плотно вставьте вкладыш в ухо. Подвигайте его вверх и вниз, чтобы убедиться, что наушник находится на своем месте.
4. Вкладыш подбирайте чуть большего размера, чем ваше ухо. Он должен плотно прилегать к уху — это поможет избежать появления шумов. Если вы слышите свист, значит, вкладыш слухового аппарата не подходит вам по размеру.
5. Пожалуйста, выключайте слуховой аппарат или извлекайте из него батарею, когда перестаете использовать аппарат. При первом и повторных надеваниях устройства переведите переключатель режимов в положение Вкл и постепенно настройте громкость, чтобы ясно слышать окружающие звуки. Включайте слуховой аппарат только на минимальной громкости, чтобы не травмировать слух громким резким звуком. Постепенно настраивайте громкость после включения.

#### Уход за слуховым аппаратом

Если нет звука от слухового аппарата возможно, это вызвано следующими причинами:

1. Аппарат выключен;
2. Батарея вставлена неправильно;
3. Батарея села;
4. Наушник повреждён;
5. Повреждён провод

Если звук стал очень слабым или нечётким, возможно, это вызвано двумя причинами:

1. Батареи почти села;
2. Наушник неисправен.

#### Введение


Благодарим вас за покупку нашего слухового аппарата. Если вам трудно хорошо слышать других, слуховой аппарат поможет вам восстановить комфортный уровень слуха и жить той жизнью, к которой вы привыкли.

Ношение слухового аппарата означает заново открыть для себя удовольствие от встреч с друзьями и семьей, чувствовать себя более уверенно на работе и наслаждаться фильмами, музыкой и телепрограммами.

#### Характеристики

- Макс. вывод звука: 110 ± 5 дБ;
- Усиление звука: ≥ 30 дБ;
- Искажение звуковой волны: ≤ 10 %;
- Диапазон частот: 300 Гц – 4000 Гц;
- Входящий шум: ≤ 40 дБ;
- Напряжение: 1,5 В;
- Сила тока: ≤ 4 мА;

#### Знакомство с устройством

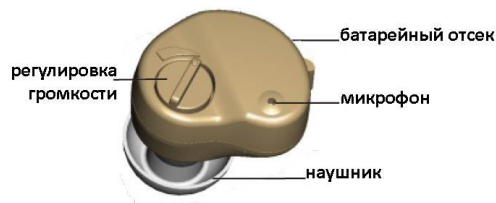

Батарея AG3 или А312 цинково-воздушная.

«+» – положительный полюс батареи

«-» – отрицательный полюс батареи

«↻» – регулятор громкости

Используйте чистую сухую ткань и специальное моющее средство для чистки аппарата.

#### Примечание

1. Пожалуйста, не используйте слуховой аппарат на большой громкости в течение длительного времени, это может повредить ваш слух.
2. Следите за состоянием изделия постоянно, чтобы избежать блокировки наушника или микрофона посторонними предметами. Поддерживайте вкладыш в ухо в чистоте.
3. Не подвергайте слуховой аппарат и его батарею воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры и воды. Не используйте в душе, под дождем, во время купания.
4. Не роняйте аппарат на пол.
5. Если в течение долгого времени не планируете пользоваться слуховым аппаратом, выньте батарею из устройства.
6. Не разбирайте самостоятельно слуховой аппарат. В случае возникновения неполадок, обратитесь в сервисный центр.
7. Не утилизируйте батарею слухового аппарата с бытовыми отходами.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66