



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Эндоскоп для ушей цифровой I-98
(1.3 Мп)**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
2. Технические характеристики	3
3. Использование с телефоном	3
4. Использование с ПК или ноутбуком	4
4.1 Использование с Windows	4
4.2 Использование с MAC OS	5

1. Меры предосторожности

1. Эндоскоп не является водонепроницаемым, его нельзя мыть, протрите его спиртом, если требуется очистка.
2. Лучшее фокусное расстояние камеры составляет 1,5-2 см.
3. Пожалуйста, будьте осторожны при использовании продукта, не прикасайтесь к барабанной перепонке, вы можете её повредить.
4. Нагрев эндоскопа во время использования является нормальным явлением.
5. При использовании внимательно прочитайте инструкции.

2. Технические характеристики

- Диаметр объектива: 5,5 мм / 3,9 мм;
- Длина кабеля: 1,5м / 2м;
- Разрешение: 640x480 / 1280x720;
- Фокусное расстояние: 2 см;
- Размер датчика: 1/9 дюйма;
- Угол обзора: 70°;
- Экспозиционный свет: автоматический;
- Рабочая температура: 0 °С – 70 °С;
- Подсветка: светодиодная, регулируемая;
- Питание: 5В;
- Поддерживаемое ПО: Android /Win7 /Win8/Vista/XP;
- Формат фото: JPEG;
- Формат видео: AVI;

3. Использование с телефоном

- а) Скачайте и установите приложение «USB Camera» или «AN98» из магазина приложений Google Play или отсканируйте QR-код камерой вашего телефона:



USB CAMERA



AN98

b) Откройте приложение. Вы увидите изображение в реальном времени




1. Запись видео;
2. Снимок фотографии;
3. Фото и видео файлы;
4. Настройки
5. Поворот изображения


4. Использование с ПК или ноутбуком

4.1 Использование с Windows


- a) Перейдите по ссылке <http://www.51scope.cn/files/setup.rar>. Начнется загрузка архива setup.rar. Установите приложение «viewplayсар».
- b) Подключите эндоскоп напрямую к компьютеру или ноутбуку.
- c) Запустите приложение «viewplayсар». Нажмите «Device» и выберите «USB.2.0 PC Camera». Вам откроется окно просмотра изображения в реальном времени.
- d) Для того, чтобы сделать снимок происходящего, нажмите на иконку с изображением фотоаппарата в приложении.

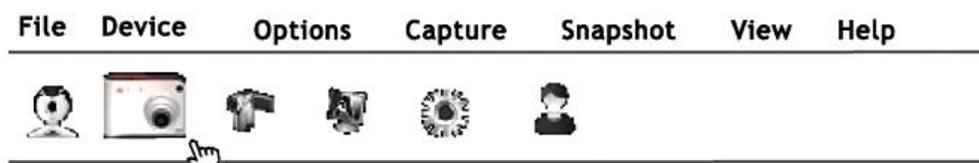

- e) Для того, чтобы начать видеозапись нажмите в меню «File», затем выберите пункт «Set Capture File», чтобы создать пустой файл.

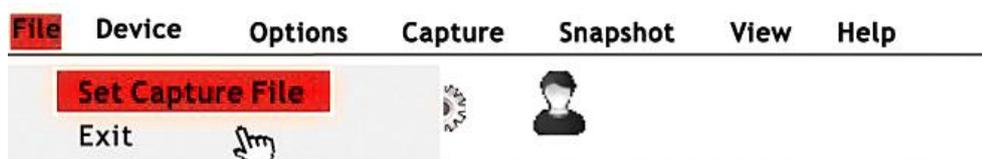

Нажмите кнопку «Capture» и иконку с изображением видеокамеры.

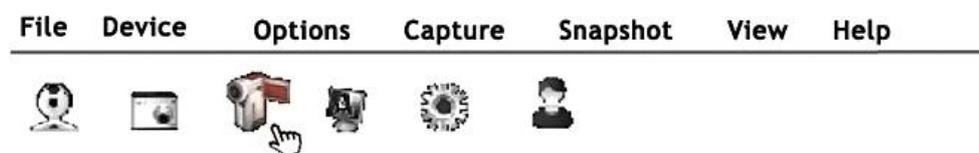

4.2 Использование с MAC OS

- a) Подключите эндоскоп напрямую к MACbook.
- b) Запустите приложение «QuickTime Player» «Photo Booth» или «VLC» (VideoLan Client), чтобы увидеть изображение в реальном времени.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**